

## Oftest stillede spørgsmål og svar vedrørende DermaSilk

Spørgsmål	Svar
<b>Kryber DermaSilk ved vask?</b>	Ja, 6-8 %, men det kan samtidig strækkes 20 %.
<b>Hvordan skal DermaSilk vaskes?</b>	Enten i hånden eller ved 30/40 grader i vaskemaskine (finvask).
<b>Hvilket vaskemiddel anbefales?</b>	Vi anbefaler et ph-neutralt vaskemiddel eller en ph-neutral shampoo uden balsam – for eksempel Neutral® flydende vaskemiddel til uld- og finvask.
<b>Hvor ofte skal tøjet skiftes/vaskes?</b>	<p>Dette afhænger meget af, hvordan det bruges. DermaSilk bør skiftes med samme interval som man normalt skifter andet undertøj.</p> <p>DermaSilks effekt afhænger bl.a. af, at overfladen er ren, så den antimikrobielle effekt kan få lov at virke.</p>
<b>Hvorfor skal jeg ved hver 10. vask lægge tøjet i blød i natron?</b>	<p>Vores vand indeholder en del mineraler, som ophober sig i tøjet og kan irritere huden. Natron fjerner disse og forlænger tøjets levetid.</p> <p>Samtidig er i blødlægningen i natron nødvendig for at bevare den fulde antimikrobielle effekt.</p>
<b>Må tøjet tørretumbles?</b>	Nej. Det skal ligge-tørre
<b>Må tøjet stryges?</b>	Ja, men på svag varme.
<b>Må man bruge creme under tøjet?</b>	<p>Ja, men eftersom DermaSilk virker bedst i direkte kontakt med ren hud, skal cremen absorberes inden tøjet tages på.</p> <p>Samtidig bør man undgå at indersiden af stoffet bliver 'fedtet ind' i creme, da DermaSilk så ikke kan virke efter hensigten.</p>
<b>Kan DermaSilk erstatte steroidcreme?</b>	En publiceret undersøgelse har vist at DermaSilk havde samme behandlingseffekt som steroidcreme. Man bør dog kun erstatte allerede iværksat behandling efter nærmere aftale med lægen.

	<p>Normalt vil det være ideelt at bruge DermaSilk som supplement til, eller i stedet for steroid behandling.</p> <p>Vær opmærksom på, at DermaSilks behandlingseffekt er afhængig af hvor flittigt og konsekvent man bruger tøjet.</p>
<b>Kan DermaSilk erstatte fugtighedscreme?</b>	<p>Nej, man skal altid sørge for at tilføre den sarte og tørre eksemplagede hud den fugt, som den har brug for.</p>
<b>Skal DermaSilk kun bruges når man har udbrud af eksem?</b>	<p>Nej, DermaSilk virker både helende og forebyggende, så det vil være en fordel, at benytte tøjet så meget som muligt – dog er det selvfølgelig vigtigst når man har udbrud af eksem.</p>
<b>Er DermaSilk varmt/koldt at have på?</b>	<p>DermaSilk har en naturlig evne til hurtigt at nå brugerens kropstemperatur og derefter holde den, så man har det tilpas.</p> <p>Samtidig kan DermaSilk absorbere og dernæst frigøre fugt fra kroppen svarende til 30 % af dets egen vægt uden at føles fugtigt.</p>
<b>Hvor længe holder den antimikrobielle effekt?</b>	<p>Den antimikrobielle effekt holder efter utallige vaske, og selv efter 50 vaske er effekten optimal. Det er dog nødvendigt, at DermaSilk lægges i blød i almindelig natron (natriumbicarbonat) før hver 10. vask.</p>
<b>Hvordan virker den antimikrobielle effekt?</b>	<p>Den positivt ladede antimikrobielle effekt, AEM 5772/5, virker således, at den tiltrækker de negativt ladede bakterier som trives på huden, hvorefter den gennemtrænger bakteriernes celledmembran og nedbryder dem, så de tilintetgøres.</p> <p>Den antimikrobielle behandling er helt ufarlig og uden bivirkninger. Der afgives ingen stoffer mod huden.</p>
<b>Hvor længe holder tøjet?</b>	<p>DermaSilk er et medicinsk produkt og skal behandles varsomt. Holdbarheden afhænger af hvor ofte man bruger det, om man bruger det sammen med andet tøj, hvor ofte det vaskes osv. Så holdbarheden er meget individuel fra bruger til bruger.</p>
<b>Hvorfor er DermaSilk så tyndt?</b>	<p>Det er det tynde, fine stof, der gør det muligt for huden at ånde frit i tøjet og for den, der bærer det at kunne have andet tøj udenpå uden at blive generet af det.</p>
<b>Kan sammensyningerne genere huden?</b>	<p>Nej. På babytøjet sidder alle syninger udvendigt, og på alt andet tøj er syningerne lavet så fine, at de ikke generer huden.</p>
<b>Kan man blive immun overfor DermaSilk?</b>	<p>Nej. Bakterier og svampe, som kommer i kontakt med DermaSilk, dør, og derfor er der ingen risiko for, at de udvikler resistens.</p>
<b>Kan man blive allergisk overfor DermaSilk?</b>	<p>Nej, det protein, som man evt. kan være allergisk overfor i silke, sericin, er fjernet fra DermaSilk, så alle kan benytte tøjet uden gener af nogen art.</p>

<b>Er DermaSilk skadeligt for miljøet eller kan den antimikrobielle effekt skade huden?</b>	<p>Nej, DermaSilk skader hverken miljøet eller mennesker. Et studie, foretaget på SSCCP-instituttet i Milano, viste, at den antimikrobielle effekt er permanent knyttet til DermaSilk, og at stoffet ikke afgav nogen kemikalier el. lign. selv efter 8 timer i vand. Der afgives derfor heller ingen stoffer til huden, så dennes naturlige mikroorganismer, som ligger nede i huden, berøres ikke.</p> <p>DermaSilks antimikrobielle effekt er godkendt af det amerikanske miljø-beskyttelses agentur EPA (Environmental Protection Agency) og er på den europæiske Øko-Tex 100-liste.</p>
<b>Kan DermaSilk hjælpe mod psoriasis?</b>	<p>Der er ikke lavet nogen studier vedr. DermaSilk og psoriasis, men nogle psoriasispatienter har haft en bedring ved brug af DermaSilk.</p>